

Manuel d'utilisation












C 216-100 (HM80D)

Toise enfant électronique portable



Veuillez garder le manuel d'instructions à portée de main tout le temps pour référence

Explication du texte/des symboles sur l'étiquette/de l'emballage de l'appareil

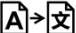Texte/Symbole	Signification
	Attention, consulter les documents d'accompagnement avant utilisation
	Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément à la directive 2002/96/CE. Ne pas jeter l'appareil avec des déchets quotidiens
	Nom et adresse du fabricant de l'instrument, et année/pays de fabrication
	Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation, et suivez les instructions d'utilisation.
	Dispositif électromédical, pièce appliquée de type B
	Numéro de catalogue de l'appareil / modèle number
	Numéro de lot ou de lot du fabricant pour l'appareil
	Numéro de série de l'appareil
	Identificateur unique de l'appareil
	Nom et adresse de l'entité qui importe le dispositif (le cas échéant)
	Nom et adresse de l'entité responsable de la traduction des informations à utiliser (le cas échéant)

Avis de droit d'auteur**Charder Electronic Co., Ltd.**

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Téléphone: +886-4-2406 3766

Télécopie : +886-4-2406 5612

Site Web : www.chardermedical.com Courriel : info_cec@charder.com.tw

Droits d'auteur© Charder Electronic Co., Ltd. Tous droits réservés.

Ce manuel d'utilisation est protégé par le droit d'auteur international. Tout le contenu est sous licence et l'utilisation est soumise à l'autorisation écrite de Charder Electronic Co., Ltd. (ci-après Charder) Charder n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences énoncées dans ce manuel. Charder se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression dans le manuel sans préavis et de modifier l'extérieur de l'appareil à des fins de qualité sans le consentement du client.



Charder Electronic Co., Ltd.
No 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

SOMMAIRE

I. Notes de sécurité	
A. Informations générales.....	5
B. Directives CEM et déclaration du fabricant.....	7
II. Assemblage sur MS3500/MS21NEOV/MS4200	10
III. Assemblage sur MS5900	12
IV. Assemblage sur MS2400	15
V. Assemblage sur MS5980	17
VI. Préparation en vue de l'utilisation	
Clés	18
Insertion de piles	18
Étalonnage.....	18
VII. Utilisation de l'appareil	19
VIII. Dépannage	20
IX. Spécifications du produit	21
X. Déclaration de conformité	24

I. Notes de sécurité

A. Informations générales

Merci d'avoir choisi cet instrument de marque Charder. Il est conçu pour être facile et simple à utiliser, mais si vous rencontrez des problèmes non abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre revendeur ou bien Abilanx. Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence. Il contient des instructions importantes concernant l'installation, l'utilisation correcte et la maintenance.

Usage prévu

Ce dispositif médical est conçu pour être utilisé conformément aux réglementations nationales, pour mesurer la taille des bébés par des professionnels.

Bénéfice clinique

Les résultats de mesure peuvent être utilisés par les professionnels pour diagnostiquer (et surveiller) les problèmes liés à la taille.

Manutention générale

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane, solide et non glissante.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement verrouillées et serrées avant d'utiliser l'appareil.
- La précision de la mesure nécessite que les pieds, le dos et la tête du sujet soient alignés en ligne droite. Veuillez noter que la hauteur peut varier tout au long de la journée.
- **ATTENTION** : Ne pas utiliser à côté d'un équipement susceptible de causer des interférences électromagnétiques ou d'autres types d'interférences .

Consignes de sécurité

Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des instructions importantes pour l'installation et la maintenance de l'appareil.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des instructions suivantes:

- L'appareil a une durée de vie prévue de 5 ans lorsqu'il est correctement manipulé, entretenu et inspecté périodiquement conformément aux instructions du fabricant.

- Une mauvaise installation rendra la garantie nulle et non avenue.
- Respecter les températures ambiantes admissibles pour l'utilisation

Nettoyage

- La surface de l'appareil doit être nettoyée à l'aide de lingettes à base d'alcool.

Garantie/Responsabilité

- La période de garantie est de 24 mois, à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes: stockage ou utilisation inapproprié, installation ou mise en service incorrecte par le propriétaire ou des tiers, usure naturelle, changements ou modifications, manipulation incorrecte ou négligente, interférence chimique, électrochimique ou électrique, sauf si les dommages sont imputables à une négligence de la part de Charder.
- Cet appareil ne contient aucune pièce gérée par l'utilisateur. Tous les entretiens, inspections techniques et réparations doivent être effectués par un partenaire agréé, en utilisant des accessoires et des pièces de rechange Charder d'origine. Charder n'est pas responsable des dommages résultant d'un entretien ou d'une utilisation inappropriés. Le démontage de l'appareil annulera la garantie.

Rapports d'incidents

- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant ou Abilanx, au représentant de l'UE (si le dispositif est utilisé dans un État membre de l'UE) et à l'autorité compétente de l'État membre de l'utilisateur/du sujet.


B. Lignes directrices CEM et déclaration du fabricant

Lignes directrices et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques		
Le produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Essai d'émission	Conformité	Guidage électromagnétique de l'environnement
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil utilise l'énergie RF uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences dans les équipements électroniques à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe A	Le produit convient à une utilisation dans tous les établissements autres que domestiques et ceux directement connectés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Orientation et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
Le produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau d'essai IEC 60601	Niveau de conformité	Guidage électromagnétique de l'environnement
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	<u>\pm contact 8 kV</u> <u>\pm 2 kV, \pm 4 kV, \pm 8 kV \pm 15 kV air</u>	<u>\pm contact 8 kV</u> <u>\pm 2 kV, \pm 4 kV, \pm 8 kV \pm 15 kV air</u>	Les planchers doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30%
Fréquence de puissance (50/60 Hz) champ magnétique IEC 61000-4-8	<u>30 A/m</u>	<u>30 A/m</u>	Les champs magnétiques de fréquence de puissance de l'appareil doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.
NOTE UT est la tension du secteur alternatif avant l'application du niveau d'essai.			

Orientation et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau d'essai IEC 60601	Niveau de conformité	Guidage électromagnétique de l'environnement
RF rayonnée IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz	3 V/m <u>80 MHz à 2,7 GHz</u>	<p>Distance de séparation recommandée :</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz</p> <p>Où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).</p> <p>L'intensité du champ des émetteurs RF fixes, telle que déterminée par une étude électromagnétique devrait être inférieure au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences.</p> <p>Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement marqué du symbole suivant:</p> <div style="text-align: center;">  </div>

NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

a Les intensités de champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la radio AM et FM et la diffusion télévisée ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude de site électromagnétique devrait être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où l'instrument est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'appareil doit être observé pour vérifier le fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil.

b Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre l'équipement de communication RF portable et mobile et l'appareil

Le dispositif est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'appareil, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur m		
	150 kHz à 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz à 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
Dans			
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23


Pour les émetteurs évalués à une puissance de sortie maximale non indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où p est la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

NOTE1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.


REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

II. Assemblage sur balances MS3500/MS21NEOV/MS4200


1. Fixer le support au plateau à l'aide de vis de support

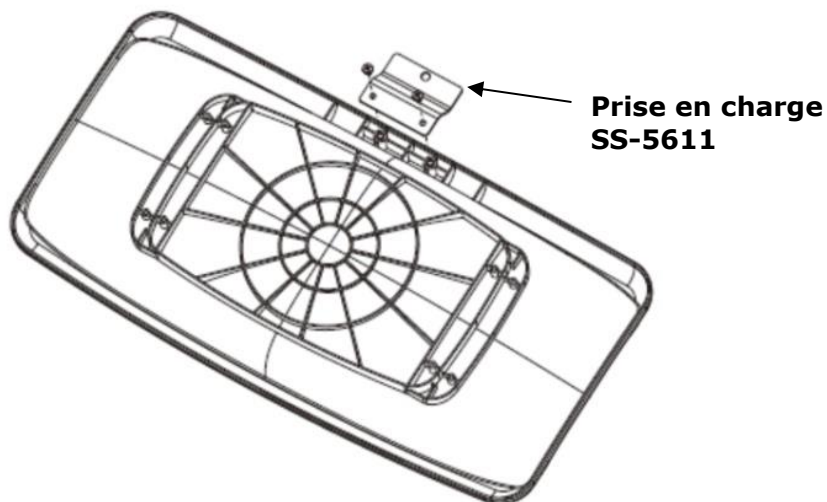


2. Glisser la toise sur le support jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de clic indiquant qu'il a été solidement fixé

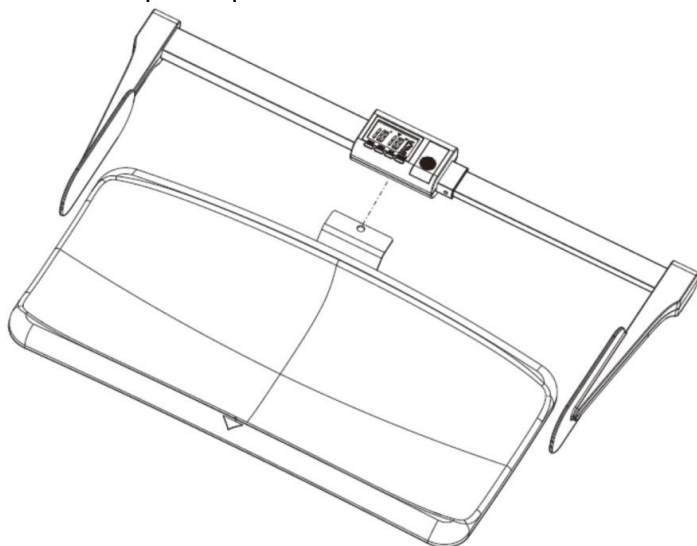

3. Assemblage terminé

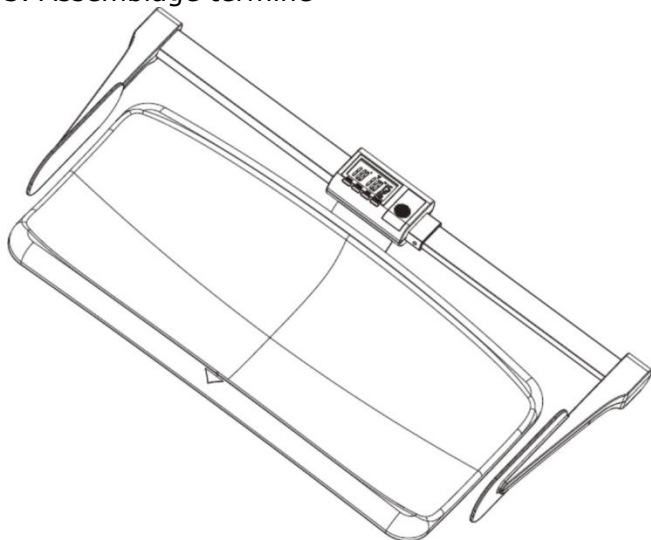


(Pour détacher la toise, appuyez sur la touche en bas tout en tirant)

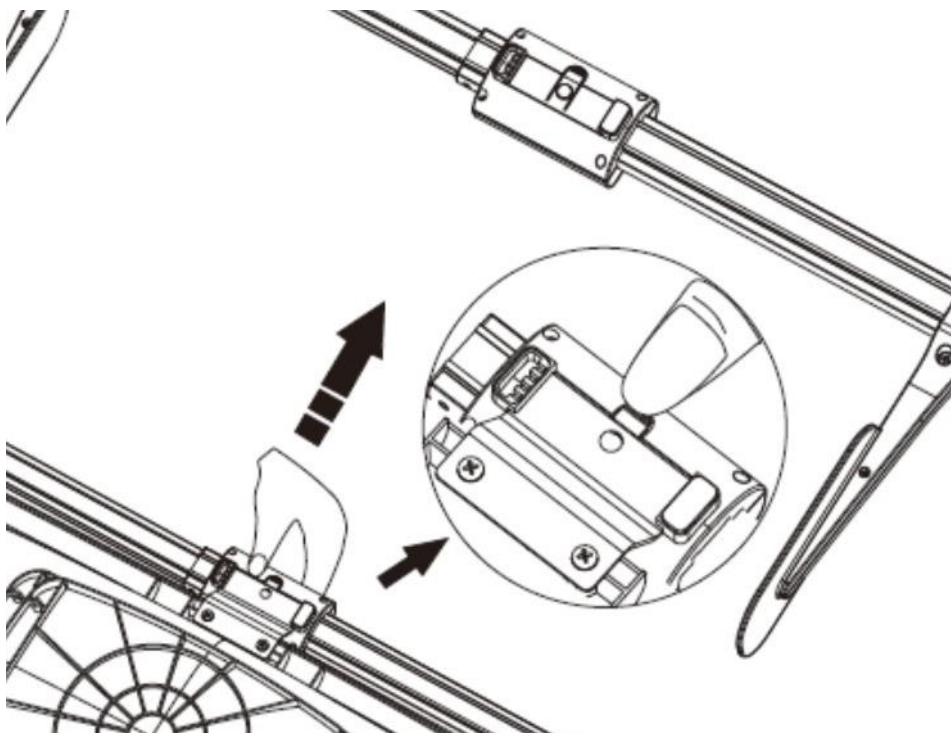


III. Assemblage sur balance MS5900


1. Pousser le couvercle du support de support vers l'écran

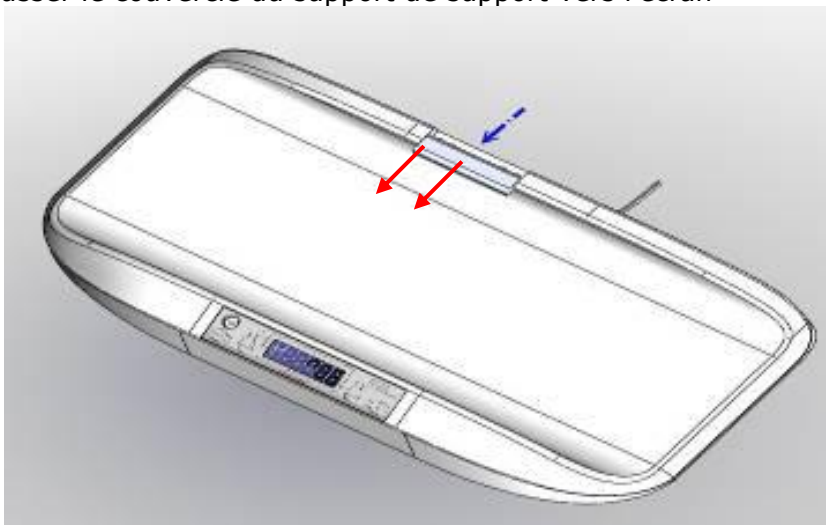


2. Retirer le couvercle du support

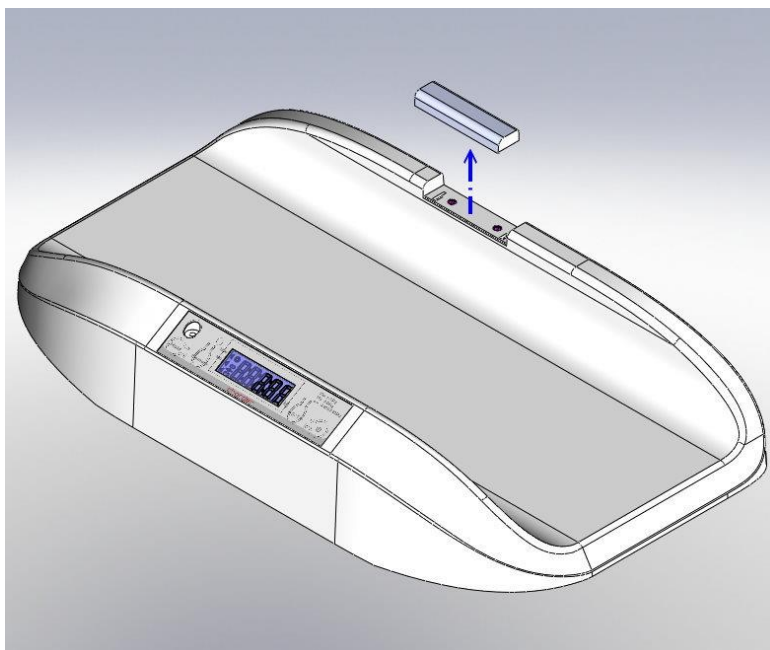


3. Fixer le joint SS-6611 sur l'appareil avec deux vis

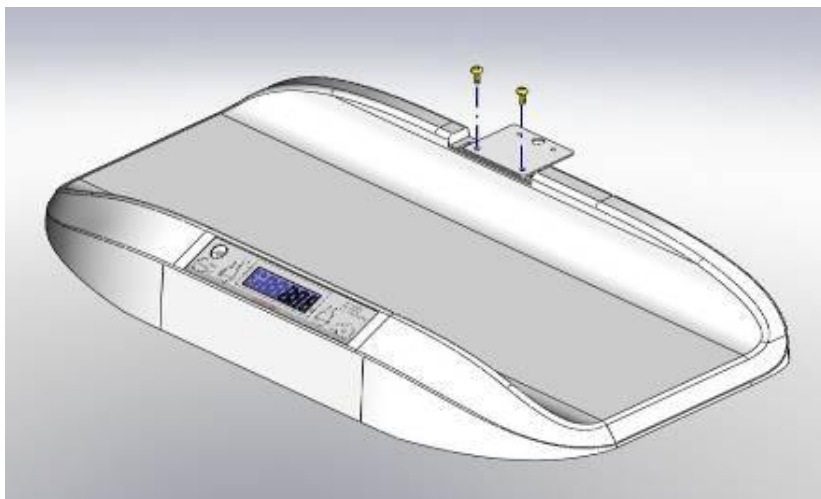


4. Glisser la toise sur le support jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de clic indiquant qu'il a été solidement fixé

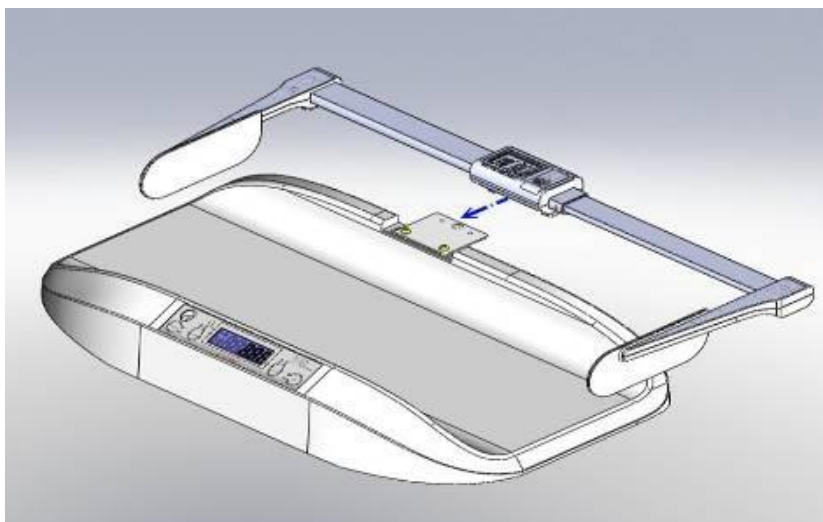

5. Couvercle du support de support de placement remis en place

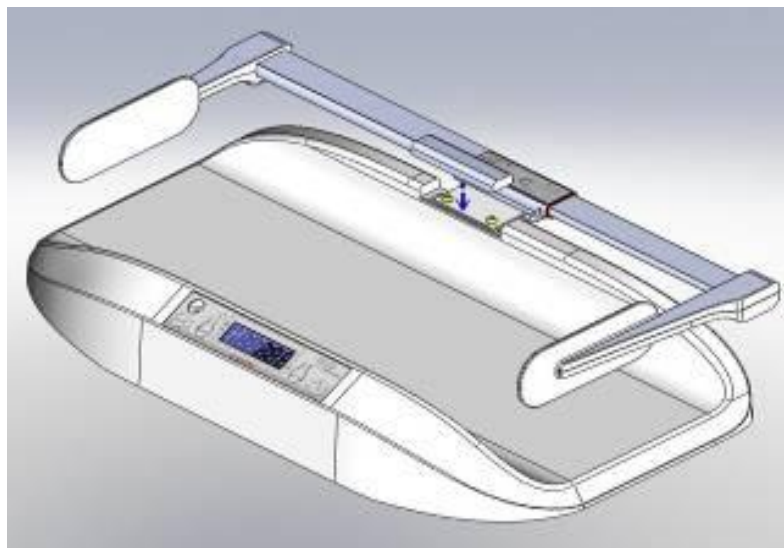


Pour détacher la toise, retirer le couvercle du support et appuyer sur la languette en bas tout en tirant

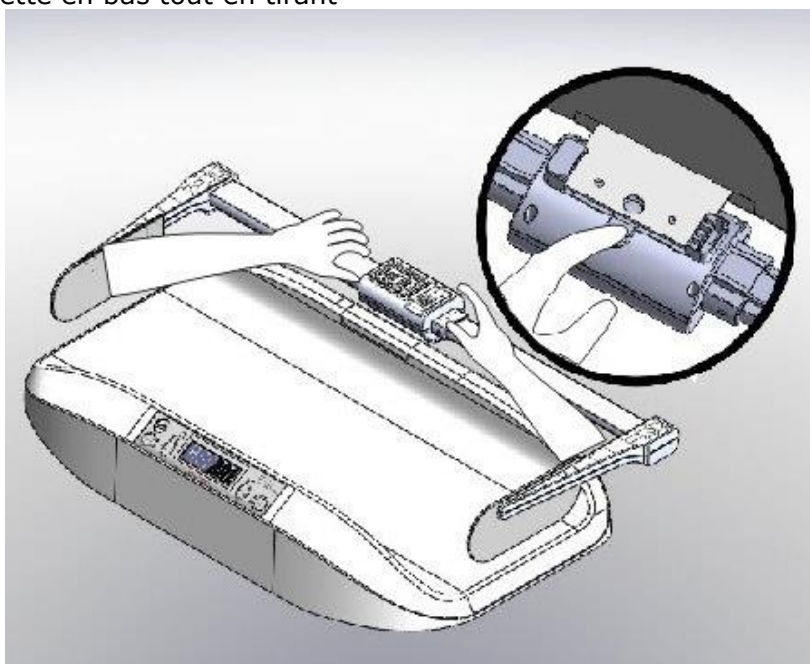


IV. Assemblage sur balance MS2400

1. Fixer le support à l'appareil et fixez les vis à l'aide d'un tournevis.


Version avec coussinet de tête en caoutchouc

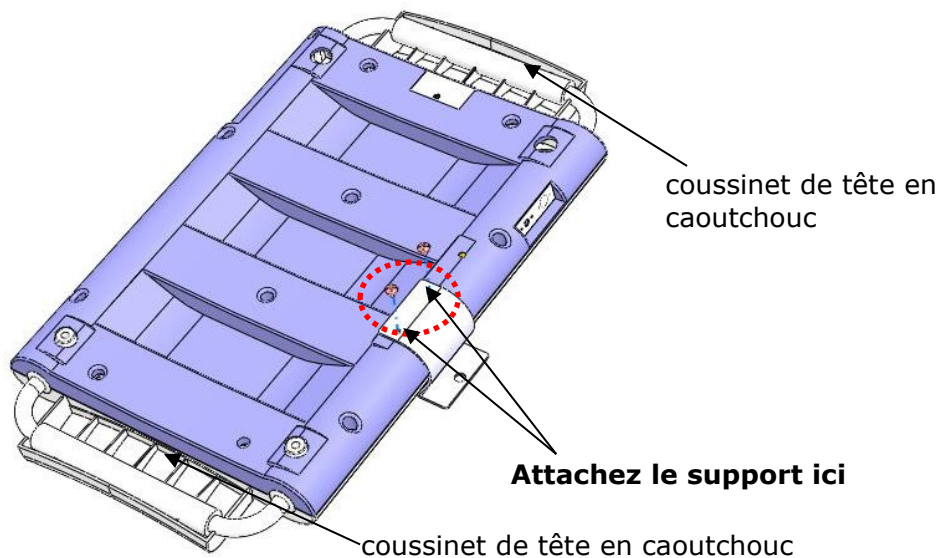


Version sans coussinet de tête en caoutchouc

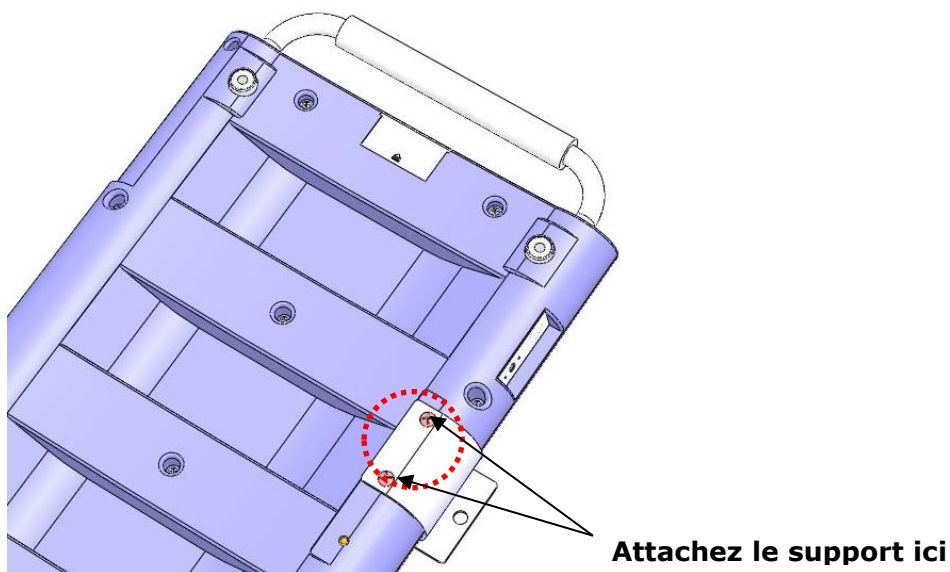

2. Fixer l'attache de la toise au support. Un bruit de clic se fera entendre.

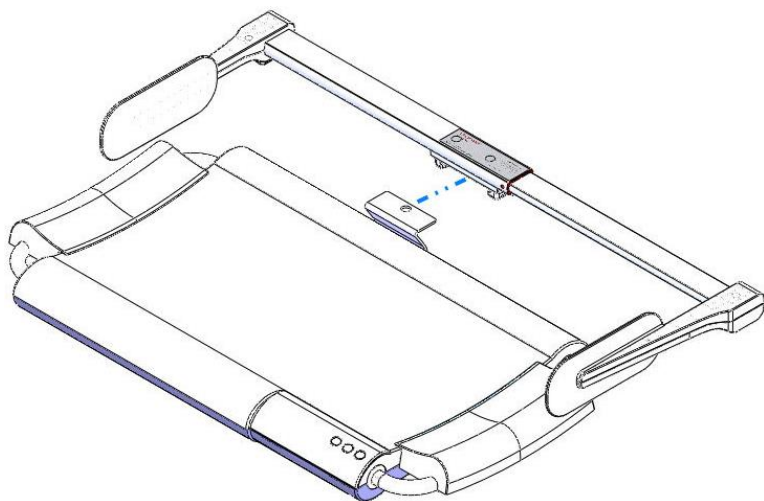


3. Pour détacher la toise, trouver le loquet situé à l'arrière de l'accessoire. Appuyer sur la boucle et retirer doucement l'accessoire du support.

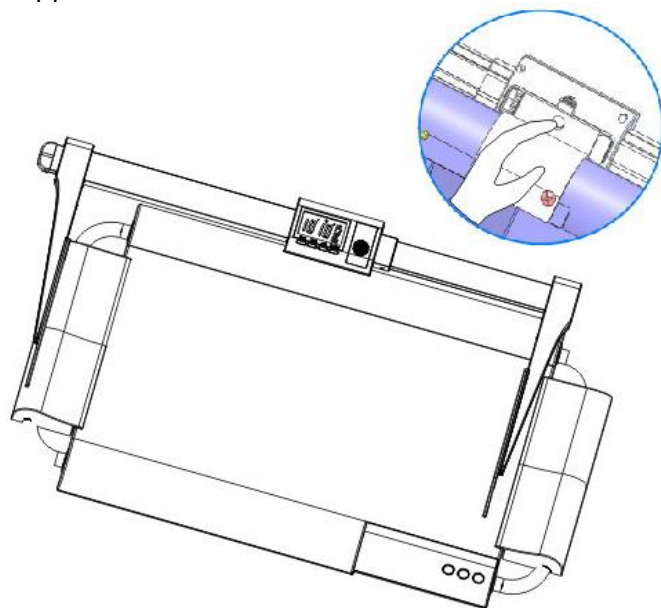


V. Assemblage sur la balance MS5980

1. Fixer un support de tige de hauteur en forme de L à la colonne avec deux vis.

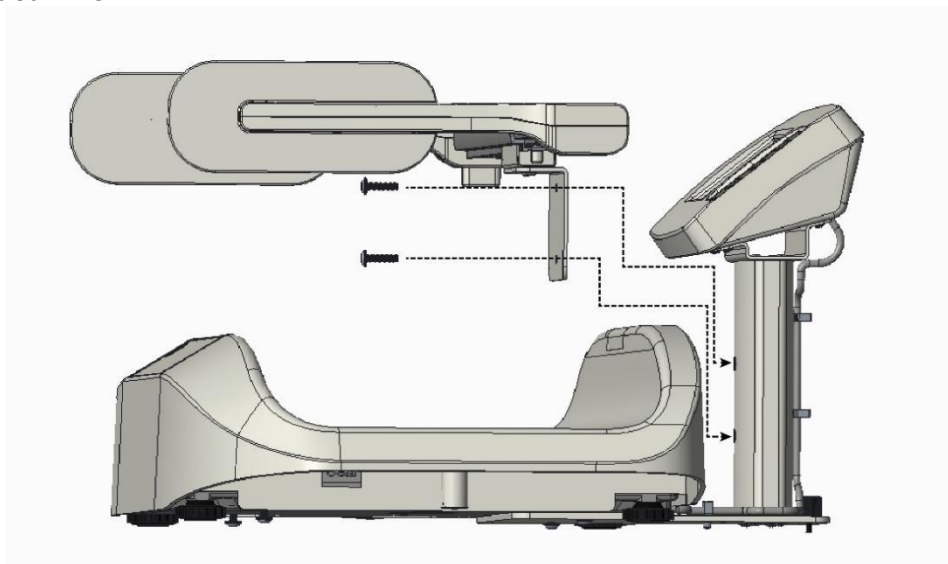

2. Installation complète de la toise.

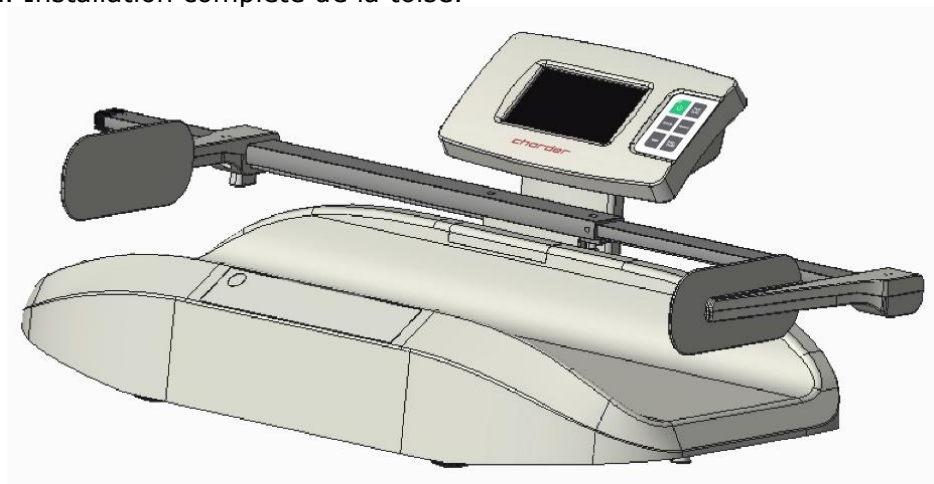

VI. Préparation à l'utilisation

Bouton :

RESET: Appuyer après avoir poussé la toise à la position la plus basse pour calibrer à la valeur la plus basse


UNITÉ: Unité de mesure

HOLD: Maintenir la valeur de mesure de la hauteur à l'écran

ON | OFF: Allumage et extinction de l'appareil

Insertion de piles


Insérer 2 piles de type AAA

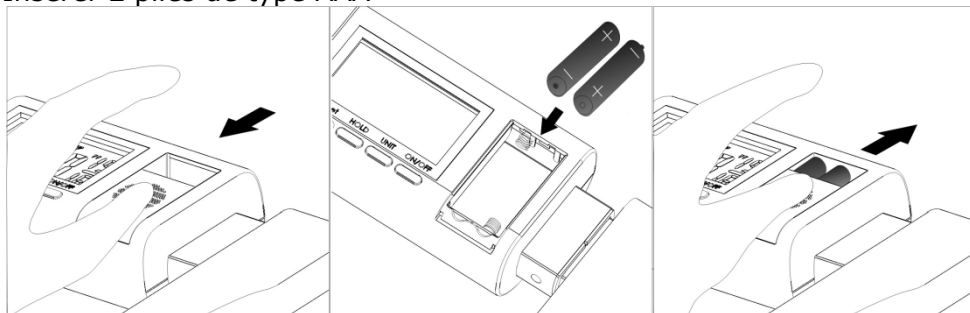

Ajustage


1. Pousser la tige de la toise à gauche jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétractée

2. Appuyer sur **la touche RESET** pour ajuster à 35,0 cm

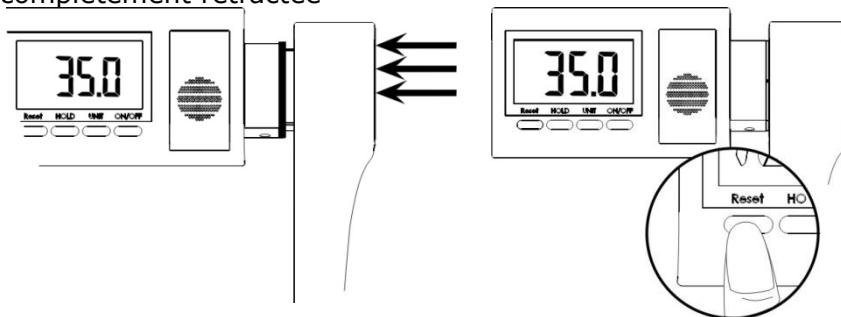


VII. Utilisation de l'appareil


1. Allumer l'appareil en appuyant sur la touche **ON / OFF**

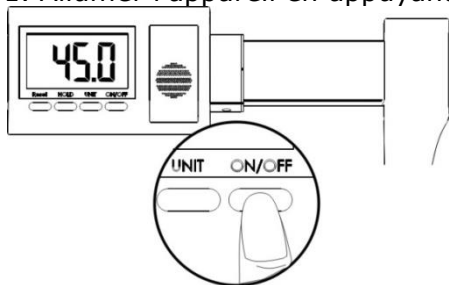

2. Allonger le nourrisson sur une plate-forme plate, avec la tête touchant le bouchon de la tête. Allonger les jambes du nourrisson

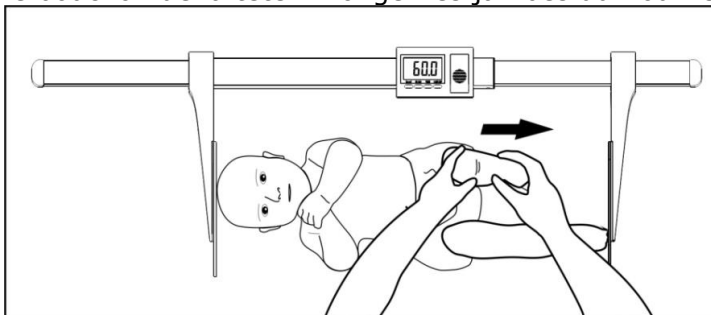


3. Utiliser la main gauche pour fixer les pieds du nourrisson, tandis que la main droite pour pousser le support pied jusqu'à ce qu'il touche la plante des pieds du nourrisson. Appuyer sur la touche **HOLD** pour verrouiller la mesure de la taille

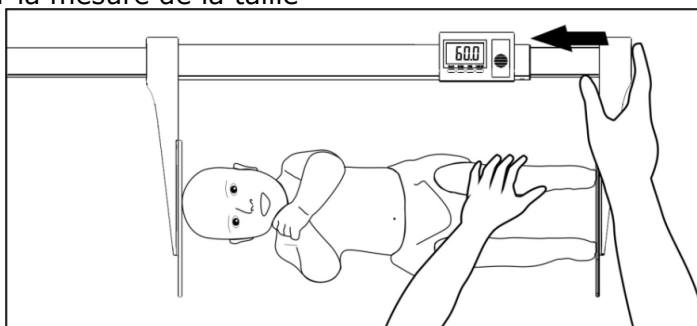

4. Le nourrisson peut maintenant être retiré en toute sécurité
5. Après avoir déterminé la taille, appuyer sur la touche **HOLD** pour désactiver le verrouillage.

VIII. Dépannage

Si le bouchon de tête se détache, veuillez le remettre en position

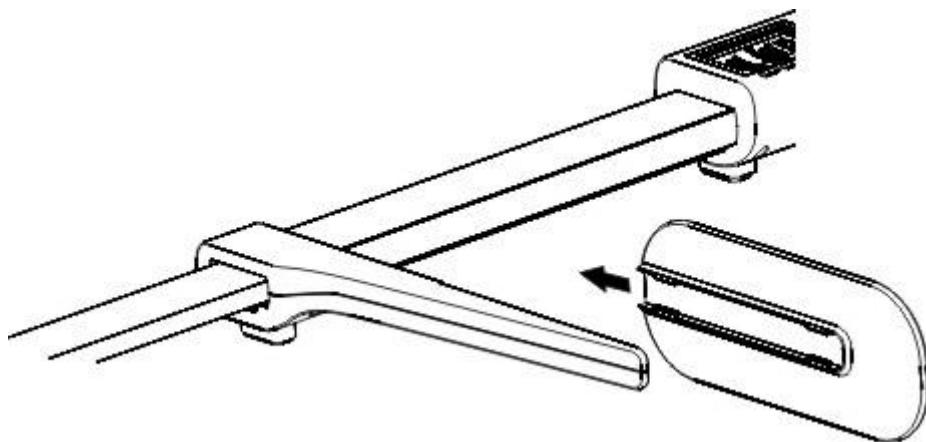

IX. Spécifications du produit

Modèle		HM80D/C 216-100
Unité de Mesure	Gamme	35-80 cm
	Graduation	1 mm
	Exactitude	±10 mm
Taille	Total	870(L) x 290(P) mm
Poids de l'appareil		0,6 kg
Source d'alimentation		Piles AAA (x2)
Température et humidité de fonctionnement		5°C ~ 35°C
Accessoires standard		Manuel d'utilisation x1
Accessoires en option		Ensemble de supports pour installation balances Charder

Notes

Notes

X. Déclaration de conformité

Le fabricant déclare par la présente que son produit est conforme aux règlements et normes décrits dans les directives suivantes :



**Directive RoHS 2011/65/UE et directive déléguée (UE)
2015/863**

IMPORTE ET DISTRIBUE EN FRANCE PAR :
Abilanx
Park Avenue Rue Léon Griffon
56890 SAINT AVE FRANCE
Tél : (+33) 02 97 63 70 46
Courriel : contact@abilanx.com

Représentant autorisé de l'UE :



Obelis s.a.

Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium



Fabriqué par:

Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan (R.O.C.)

CD-IN-1072 8056H 2022/06