



\* Conservez le manuel d'instructions à portée de main pour toute référence ultérieure


### Insertion des piles

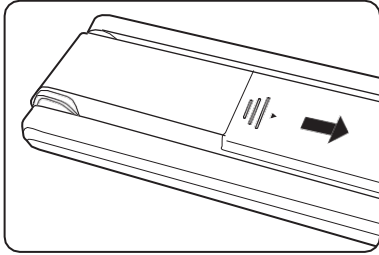

1. Ouvrir le couvercle du logement de la batterie au dos de l'appareil

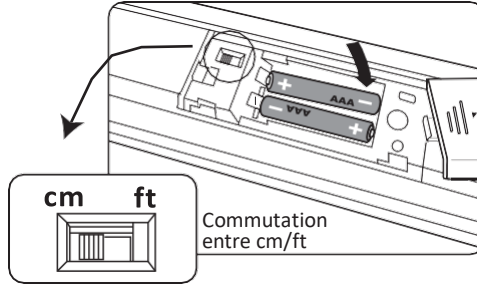




2. Insérer 2 piles AAA

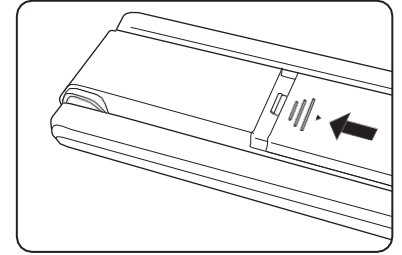







3. Fermer le couvercle du logement de la batterie

### Préparation de la mesure

#### Opération correcte

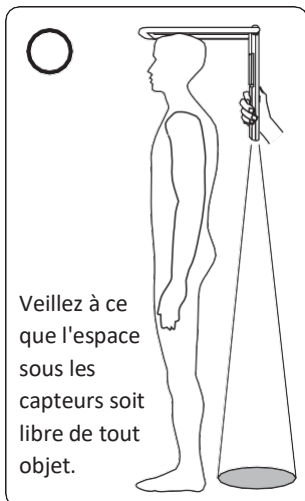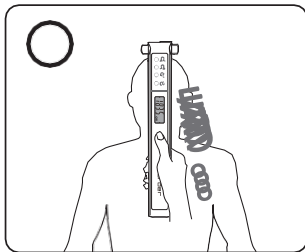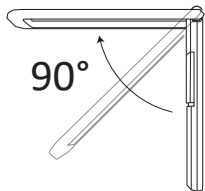



#### Opération incorrecte

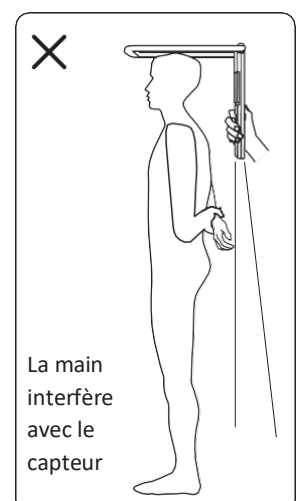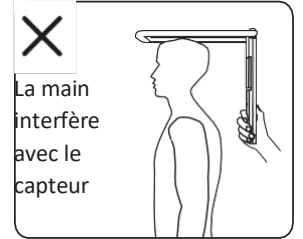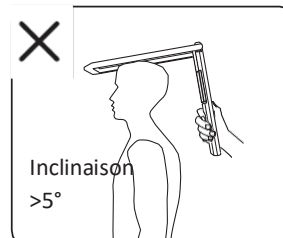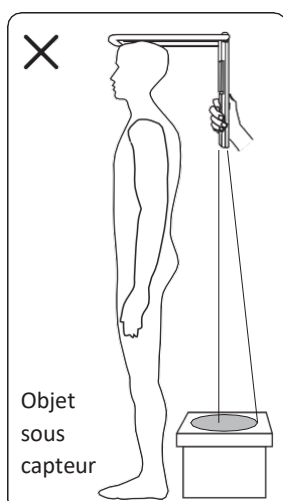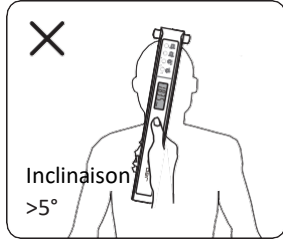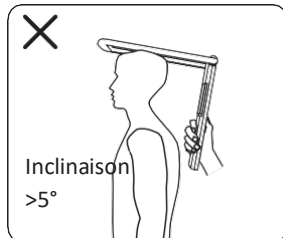



## Mode d'emploi


1. Appuyer  pour allumer l'appareil

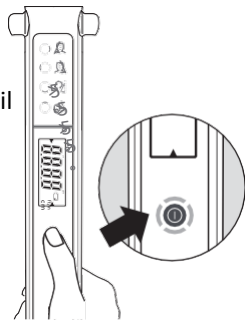

2. Lorsque l'écran affiche 0.0 cm, appuyer  à nouveau pour mesurer la hauteur

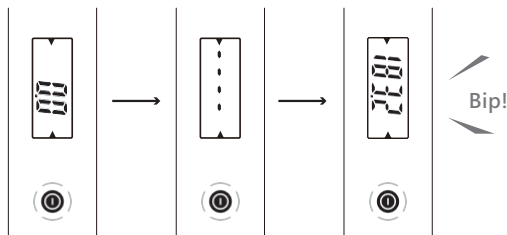

3. Après la fin de la mesure \*, appuyer  à nouveau pour effectuer la mesure suivante

4. Appuyer et maintenir  pour éteindre l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes s'il n'est pas utilisé.

\* NOTE: sur le modèle sans fil, les résultats seront transférés automatiquement à l'appareil récepteur




## Specifications

Modèle		HM250U
Mesure de la hauteur	Capacité	50-250 cm 1'8"-8'0"
	Graduation	0.1 cm / 0.1 in
	Précision	+/- 1.5 cm
	Écran LCD	50 x 20 mm
Dimensions	Plié	349(W) x 64(D) x 23(H) mm
	Dépliée	349(L) x 315(D) x 30(H) mm
Poids de l'appareil		190 g(sans piles)
Fonctions principales		Marche/Arrêt/Mesure
Transmission des données		Sans fil (en option)
Alimentation électrique		2 piles AAA
Température et humidité de fonctionnement		10°C~35°C
		15% / 85% RH
Capteur		Ultrasons
Détection de niveau		Capteur G
Avertissement de basculement		>5°
Arrêt automatique		20 secondes

## ! ATTENTION



Si l'inclinaison dépasse 5°, des témoins d'inclinaison orange s'affichent et la mesure ne peut pas être effectuée. Veuillez ajuster l'angle de l'appareil jusqu'à ce que les témoins d'inclinaison disparaissent pour effectuer la mesure.

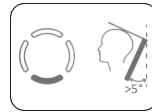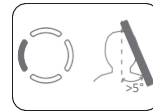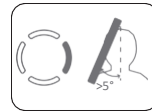

## Messages d'erreur



Hauteur supérieure à 250cm / 8'



Taille inférieure à 50 cm



Pile faible

## Informations générales

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil Charder Medical. Il est conçu pour être facile et simple à utiliser, mais si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre distributeur ou bien la société Abilanx.

### Manipulation générale

La précision de la mesure exige que les pieds, le dos et la tête du sujet soient bien alignés.

### Consignes de sécurité

- Les piles doivent être tenues hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter rapidement un médecin.
- Durée de vie prévue : 5 ans.
- Respecter les températures ambiantes autorisées pour l'utilisation.

### Environnement et nettoyage

- Toutes les piles contiennent des composés toxiques ; les piles doivent être éliminées par l'intermédiaire d'organismes compétents désignés. Les piles ne doivent pas être incinérées.
- La surface doit être nettoyée à l'aide de lingettes à base d'alcool.

### Garantie/responsabilité

- La période de garantie est de 24 mois, à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par l'une des raisons suivantes : stockage inadéquat ou incorrect, utilisation, modifications, usure naturelle ou chute sur le sol.
- Cet appareil ne contient aucune pièce entretenue par l'utilisateur. Tous les travaux d'entretien, les inspections techniques et les réparations doivent être effectués par un partenaire de service agréé par Charder, en utilisant des accessoires et des pièces de rechange d'origine Charder.

### Recyclage

- Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être déposé dans un point de collecte désigné pour les produits électroniques. Les autorités locales chargées de l'élimination des déchets peuvent fournir de plus amples informations à ce sujet.

Manufactured by:  
**Charder Electronic Co., Ltd. No.**  
103, Guozhong Rd., Dali Dist.,

Taichung City, 41262 Taiwan  
CD-IN-00387 REV 004 03/2023

**IMPORTE ET DISTRIBUE EN FRANCE PAR :**  
Abilanx  
Park Avenue Rue Léon Griffon  
56890 Saint Avé France  
Tél : (+33) 02 97 63 70 46  
[contact@abilanx.com](mailto:contact@abilanx.com)  
[www.abilanx.com](http://www.abilanx.com)